

Un conditionnement adapté à votre besoin

Les aiguilles sont emballées de façon unitaire sous blister de 8 aiguilles. Elles sont disponibles en 3 conditionnements :

La boîte de 8 aiguilles, également appelée Pack Solo, permet de n'emporter que quelques aiguilles sur soi.

La boîte de 80 aiguilles est le conditionnement idéal lorsque l'on débute une formation en auriculothérapie ou pour les consommations modérées en complément d'autres techniques.

La boîte de 200 aiguilles est la référence et le format le mieux adapté aux auriculothérapeutes. Cette boîte présentoir, refermable, protège et facilite la prise en main des blisters.

Une fois la boîte ouverte, l'identification de la nature de l'ASP est conservée ; ce qui est très intéressant pour les praticiens qui utilisent les 3 types d'aiguilles.

Toutes les boîtes comportent des pastilles adhésives de protection et une notice d'utilisation.


Si vous souhaitez tester les ASP, n'hésitez pas à nous demander une TEST-BOX contenant 4 ASP classic, 4 ASP gold et 4 ASP titanium.

Caractéristiques techniques

ASP classic - ASP gold - ASP Titanium

Aiguilles stériles à usage unique avec applicateur.

CE 0123

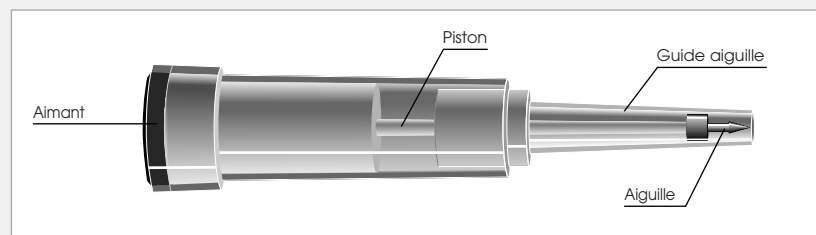

L'applicateur

- Ø 7 mm - 31 mm.
- Guide aiguille et piston en polyéthylène médical.

Assure la pression calibrée ("clic") pour l'insertion de l'aiguille.

L'aimant (disponible sur les ASP classic et gold)
- Ø 4.7 mm - 2 mm
- Aimantation bipolaire dans le plan de la pastille.

Permet d'appliquer un micro champ magnétique canalisé par l'aiguille sur le point.

L'aiguille
Partie implantable :
Ø 0.7 mm - 2.1 mm
Tête : Ø 1.3 mm - 1.1 mm

Disponibles en 3 métaux :
- Acier inox sans nickel (ASP classic)
- Acier inox recouvert d'Or pur à 99,7 % (ASP gold)
- Titane massif de grade médical 4 (ASP titanium)

Pastilles de protection

Permet de maintenir l'aiguille en place - utilisation facultative
- Ø 9 mm
- support micro poreux
- adhésif hypoallergénique

Stérilisation

- par rayonnement gamma à 25 kGy
- date de péremption à 5 ans

Conditionnement

Les trois références sont disponibles en :
- boîte de 8 (Pack solo),
- boîte de 80
- boîte présentoir de 200 aiguilles

Notice et pastilles de protection dans chaque boîte
Identification du fabricant, du type d'aiguille, du n° de lot et de la date de péremption sur le blister et sur la boîte.

Votre revendeur :

Sedatelec[®]

Chemin des Mûriers F-69540 IRIGNY
Tel. : (+33) 04 72 66 33 22 - Fax. : (+33) 04 78 50 89 03
E-mail : sedatelec@sedatelec.com
Web : www.sedatelec.com

Sedatelec[®]

ASP[®]
ORIGINAL
Aiguille d'acupuncture semi-permanente



La référence

Créée en France en 1978 d'après les travaux du Dr Paul Nogier, l'Aiguille Semi-Permanente de SEDATELEC est devenue la référence en matière d'auriculothérapie. De nombreuses années de recherche et d'amélioration de notre savoir-faire font qu'aujourd'hui l'aiguille ASP atteint un niveau de qualité incomparable. Le "clic" légendaire est devenu le gage d'une implantation parfaitement calibrée. Le praticien peut ainsi faire toute confiance au produit et porter pleinement son attention au patient.



L'aiguille des auriculothérapeutes

L'ASP® ORIGINAL est un dispositif stérile permettant d'implanter une petite aiguille de 2 mm sur le pavillon auriculaire. Elle est constituée d'un applicateur unitaire assurant une grande facilité de mise en place de l'aiguille avec une excellente précision.

Une pression calibrée permet de générer l'impulsion nécessaire à l'implantation. La forme de l'aiguille assure une bonne tenue sans risque de pénétration totale dans les tissus. Une fois implantée l'aiguille peut être protégée par une pastille adhésive fournie avec le dispositif. Les caractéristiques de l'aiguille ASP permettent d'obtenir un effet prolongé du traitement du point auriculaire.

Lors de la mise en place, le médecin ne touche jamais l'aiguille dont la stérilité est totalement protégée par l'injecteur. L'emballage unitaire permet au praticien de n'utiliser que quelques ASP d'un blister sans détruire la stérilité des aiguilles restantes.

Trois métaux pour trois applications

ASP Classic

Aiguille en ACIER INOXYDABLE sans NICKEL

Cette aiguille, stérile à usage unique, a fait la preuve de son efficacité dans les traitements d'AURICULOTHERAPIE depuis plus de 30 ans.

ASP Gold

Aiguille en acier recouvert d'une pellicule d'OR pur. L'ASP Gold sera avantageusement utilisée chez les patients allergiques.

ASP Titanium

Aiguille en TITANE massif grade 4 médical

La dernière née des ASP présente un niveau de biocompatibilité maximal. Elle sera privilégiée pour les traitements de patients à risque : diabétiques, immunodéficients ou présentant des allergies multiples.

Les plus de l'ASP® ORIGINAL

Aimant de stimulation

L'injecteur des ASP Classic et Gold comporte à son extrémité un aimant bipolaire spécialement conçu pour réactiver périodiquement l'effet de l'aiguille implantée. L'injecteur muni de l'aimant peut être confié au patient dans ce but.

Pastilles de maintien

Les pastilles adhésives fournies avec les ASP sont fabriquées avec un support micro poreux et une masse adhésive hypoallergénique. Elles sont utilisées au besoin pour maintenir l'aiguille en place (points de bordure).



Mode d'action de l'ASP® ORIGINAL

Dans les années 50, le Dr Paul Nogier a mis en évidence des corrélations entre certaines pathologies et la sensibilité à la pression de points spécifiques du pavillon auriculaire. Ainsi est née l'Auriculothérapie. Cette technique utilise la stimulation de points ou zones du pavillon auriculaire pour rétablir l'équilibre physiologique des organes ou systèmes perturbés. Son efficacité s'explique par une innervation très riche du pavillon auriculaire et la présence de nombreuses connexions avec le système nerveux central.

L'Aiguille Semi-Permanente ASP a été spécialement conçue pour le traitement de ces points pathologiques. Elle peut rester en place plusieurs jours sur le pavillon de l'oreille (10 à 20 jours) et assure ainsi une stimulation durable des points. Cette aiguille, particulièrement efficace, s'est très vite imposée comme un outil thérapeutique de choix pour les auriculothérapeutes.


Indications

Les principales indications de l'utilisation des ASP sont les algies permanentes, les désordres psychiques (dépression, angoisse, vertiges...), les troubles fonctionnels chroniques ainsi que les troubles de l'accoutumance (alcool, tabac...).

Commercialisées depuis 30 ans, elles sont aujourd'hui utilisées quotidiennement par de nombreux praticiens, hôpitaux et centres anti-douleurs, dans le monde entier.


Quelques exemples de protocoles

(extrait de NATOM Auriculo)

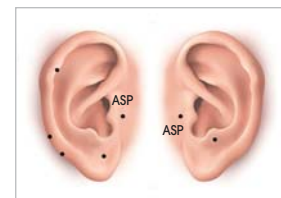


Traitement anti-tabac

2 ASP en homolatérale sur le point O'
5 aiguilles d'acupuncture
Points à personnaliser en fonction du patient

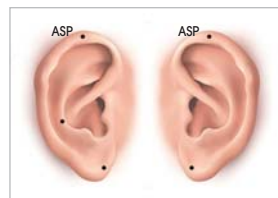

Rhinite allergique

1 ASP sur le point d'allergie
1 aiguilles d'acupuncture sur la zone du foie 15'
2 aiguilles d'acupuncture en homolatéral sur le point olfactif

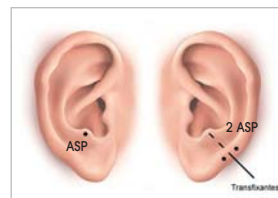

Névralgie faciale

1 ASP sur l'antitragus
1 aiguille transfixiante depuis la zone du trjumeau jusqu'à l'antitragus en passant par le point maxillo-dentaire
3 séances à 1 mois d'intervalle

Contre-indications

Le traitement par auriculothérapie ne devra être appliqué qu'après un diagnostic médical suffisant pour en déterminer la validité.

On évitera de poser une ASP sur les patients présentant des problèmes de peau à l'endroit de la poncture et sur les patients porteurs de prothèses valvulaires.

Des précautions sont à prendre pour le traitement des femmes enceintes et des patients hémophiles ou sous traitement anticoagulant.



Une fabrication sous surveillance constante

Un produit sous contrôle

L'ASP® ORIGINAL est moulée, assemblée et emballée en salle blanche stérile et conforme aux standards de qualité les plus rigoureux.

Usinée et montée par des machines automatiques conçues par nos soins, la reproductibilité de chaque aiguille est parfaite. Nettoyée aux ultrasons et désinfectée, elle offre une propreté optimale avant l'étape de stérilisation. Des contrôles de pression, des tests d'extraction et un contrôle des aiguilles, pièce par pièce en fin de fabrication, permettent de déceler le moindre défaut. Tout produit identifié non-conforme donne lieu à une analyse en interne pour améliorer notre process de fabrication.

Toutes les informations utiles sont présentes sur les blisters, les boîtes et la notice d'utilisation. On trouve en particulier le numéro de lot qui permet de retrouver l'ensemble des composants et matériaux utilisés pour la fabrication des aiguilles. Cette traçabilité garantit l'origine de nos matières premières et assure un niveau de réactivité incomparable au cas où vous rencontriez un problème à l'utilisation.

Un environnement contrôlé

La salle blanche dans laquelle les aiguilles ASP sont produites est soumise à des contrôles très rigoureux, répondant aux normes les plus sévères.



Par ailleurs, l'ASP® ORIGINAL répond à tous les tests de biocompatibilité actuellement en vigueur. Le taux de contamination microbienne est également suivi par un laboratoire indépendant.

Une stérilisation adaptée

La stérilisation par rayonnement gamma est parfaitement adaptée aux produits de santé. Elle offre une très haute qualité de stérilisation et permet d'avoir une date de péremption à 5 ans.